

# B-CURE® LASER PRO

B-Cure lääkitälaserialla uudenlaista tehokkuutta haavojen ja kudonvaurioiden hoitoon



Vakuuttavia tuloksia jopa kroonisten haavojen hoidossa. Nopea paraneminen edistää kustannustehokkuutta ja potilastyytyväisyyttä.

## QUICK GUIDE



### Virran kytkeminen laitteeseen

Paina virtakytkintä (kuvasssa 1). Lyhyen äänimerkin jälkeen näyttö käynnistyy ja siinä näytetään ajastin (kuvasssa 3).

### Aseta hoidon kesto

Paina hoitoajan säätöpainiketta (kuvasssa 2) sen oikeasta reunasta (+) lisätäksesi kestoja tai vasemmasta reunasta (-) lyhentääksesi kestoja. Ajastinta voidaan säätää 30 sekunnin tarkkuudella.

### Laserin käynnistäminen hoitoajan asettamisen jälkeen



Hoitoajan asettamisen jälkeen paina "hoidon aloitus-painiketta"



Pidä hoidon aloitus painike painettuna ja paina toisella kädellä "käynnistyspainiketta"



Vapauta molemmat painikkeet samanaikaisesti. Vihreä valo palaa ja hoito voidaan aloittaa

## SUOSITELTU HOITOPROTOKOLLA

### Krooninen diabeettinen säärihaava

B-Cure Laser Pro on perushaavahoitoa täydentävä hoitomuoto.

Haavasidokset on poistettava haavaa hoidettaessa.

**Haavan reunat:** Lääkintälaserialla annetaan jokaisen sidosten vaihdon yhteydessä. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi päivittäin, mutta kuitenkin enintään kerran päivässä. Hoito aloitetaan reunoilta, kahtena ensimmäisenä viikkona 2 min. / reuna, ja jos tämä ei tuo tulosta, nostetaan aika 3 minuuttiin / reuna. Huomioi, että hoitoalueen tulisi ulottua kullakin reunalla myös n. 2 mm haavanpohjaan


**Haavanpohja:** Lääkintälaserialla annetaan jokaisen sidosten vaihdon yhteydessä (suositus päivittäin, kuitenkin enintään kerran päivässä.) Haavanpohjan hoito aloitetaan 0,5 min / hoitoalue kaksi ensimmäistä viikkoa. Jos tämä ei tuo tulosta, nostetaan aika 1 minuuttiin / hoitoalue. Hoito toistetaan niin usein, että koko haavanpohja on hoidettu (katso oheinen kuva).

**Nivusen ja polvitaipteen lymfapisteet:** Hoida päivittäin molempia vaurioituneen jalan lymfapisteitä 1 minuutti / piste (enintään kahdesti päivässä).

### Muut haavat

Lääkintälaserialla annetaan jokaisen sidostenvaihdon yhteydessä. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi päivittäin, mutta kuitenkin enintään kerran päivässä. Hoidetaan koko haavan pituudelta, 4 min. / laserin 4,5cm<sup>2</sup> hoitoalue.

Haavan reunat ja haavanpohja

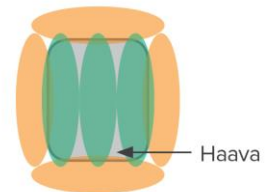

Haava

Lisätietoa:

Sanna Selenius 0400 490 610 / sanna@terveystekniikka.fi

**Terveystekniikka**